



Pulse oximeter

TSA8070
TSA8071

Extended version

Használati utasítás

HU


Köszönjük, hogy TEESA készüléket vásárolt. A használat előtt alaposan tanulmányozza át a kezelési útmutatót és tartsa meg a későbbi esetleges felhasználáshoz. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért.

BIZTONSÁGI KÉRDÉSEK

1. A készülék használata előtt bizonyosodjon meg, hogy az mechanikusan nem sérült.
2. A készülék által végzett mérési eredmények pusztán tájékoztató jellegűek. Nem lehet alapja diagnózisnak, vagy kezelésnek.
3. A készülék ne használja MR (elektromagnetikus rezonansz) és CT (számítógépes tomográf) közelében.
4. A készülék felnőttek számára készült.
5. A készülék nem rendelkezik olyan funkcióval, mely figyelmeztet a mérési idő túllépésére. A túl hosszán tartó mérési idő káros lehet a felhasználóra.
6. Ne módosítsa a készüléket.
7. Ne hajtson végre saját kezű módosítást a készüléken. A készülék meghibásodása esetén lépjen kapcsolatba a gyártó szervizével.
8. A készüléket tisztítsa minden használatot követően. A tisztításhoz ne használjon magas nyomást és maró anyagokat.
9. A készülék borítását tartsa tisztán és ne engedje elázni.
10. A készülék érzékeny a rázkódásra. Kerülje a készülék leesését és rázkódását.
11. A készülékhez használjon kizárólag alkáli AAA elemeket. Ne keverje az új és régi elemeket.
12. A rádiós zavar hatással lehet a készülék pontosságára és működésére.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA


1. Kijelző
2. Bekapcsolás gomb
3. Érzékelő

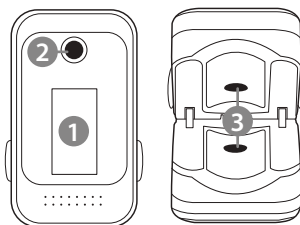


KIJELEZŐ LEÍRÁSA

1. Véroxigén mérése
2. Bekapcsolt hangjelzés
3. Pulzus mérés
4. Elem szint
5. Perfúziós index mérése*
6. Pulzus kijelző
7. Bluetooth jelzés (csak TSA8071 modell)

*TSA8071 - perfúziós index mérés az alkalmazásban érhető el

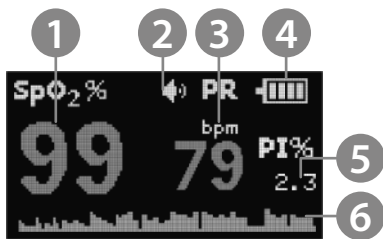

TSA8070

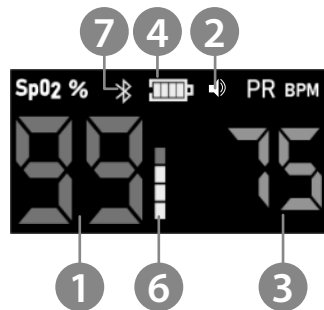

TSA8071

KEZELÉS

Elem telepítése

1. Fordítsa meg a készüléket kijelzővel lefelé.
2. Nyomja le az elemtartó fedelet a nyíl jelzésnél.
3. Csúsztassa oldalra az elemtartó fedelet.
4. Helyezzen be az elemet a polaritásnak megfelelően.
5. Zárja le az elem fedelet.

Végezze el a mérést.

1. Csúsztassa be az ujját (mutató, vagy középső) a készülékbe a bal oldalról. Az ujját teljesen dugja be, hogy elérje az érintkezőt.
2. Helyezze a kezét egyenes felületre.
3. Nyomja meg a bekapcsolás gombot. Egy kis idő múlva elindul a mérés.
 - A kijelző tájolásának megváltoztatáshoz ismét nyomja meg a bekapcsolás gombot.
 - A hang kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsolás gombot kétszer.
4. A mérés végén vegye ki az ujját a készülékből. A készülék 8 másodperc elteltével kikapcsol az ujj kivételét követően.

Figyelem:

- Ne végezzen mérést, ha a felhasználó hőmérséklete meghaladja a 41 °C-ot.
- A pontos mérésre hatással lévő tényezők: körömlakk, műköröm, kézkrém, stb.
- A mérési pontossághoz ne mozgassa az ujját, mely a készülékben található.
- Amennyiben a készülék mérés közben kikapcsol, cserélje ki az elemet újra.
- A mérést végezze 10-15 percenként.

CSATLAKOZTATÁS ALKALMAZÁSHOZ (csak a TSA8071 modell)**1. Android:**

- Töltse le és telepítse OxyCare a Google Play áruházból.
- Kapcsolja be Bluetooth és helymeghatározás.
- Nyissa meg az OxyCare alkalmazást. Ha az alkalmazás kéri, engedélyezze a hozzáférést.
- Helyezze a készüléket az ujjára és kapcsolja be.
- Nyomja meg a nagyító gombot és válassza BerryMed.
- Az alkalmazás összekapcsolódik a készülékkel. A mérési eredmény kijelzésre kerül az alkalmazásban.

2. iOS:

- Töltse le és telepítse OxyCare az App Store áruházból.
- Kapcsolja be Bluetooth.
- Nyissa meg az OxyCare alkalmazást. Ha az alkalmazás kéri, engedélyezze a hozzáférést.
- Helyezze a készüléket az ujjára és kapcsolja be.
- Nyomja meg a Bluetooth szimbólumot és válassza BerryMed.
- Az alkalmazás összekapcsolódik a készülékkel. A mérési eredmény kijelzésre kerül az alkalmazásban.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készüléket ne merítse vízbe
- Fertőtlenítse a készüléket minden felhasználó váltást követően.
- A burkolatot rendszeresen tisztítsa puha, enyhén nedves törlőkendő segítségével, maró szer használata nélkül.
- A fertőtlenítést az érzékelő környékén végezze alkoholba mártott törlőkendő segítségével.
- A tisztítást követően várja meg, míg a készülék megszárad.

HU**TULAJDONSÁGOK**

- Zavartalan mérési mód
- Kijelző OLED (TSA8070) ; LCD (TSA8071)
- Érzékelő: vörös fény
- Oxigénszint mérés:
 - Tartomány: 35 ~ 100%

- Pontosság: $\pm 2\%$ (80%~100%) ; $\pm 3\%$ (70%~79%)
- Pulzus mérés:
 - Tartomány: 25~250 készülék/perc
 - Pontosság: ± 2 készülék/perc
- Perfúziós index mérése
 - Tartomány: 0.5% ~ 20%
 - Pontosság: 0.1%
- Bluetooth kapcsolódás alkalmazással (TSA8071)
- Tápellátás: 2x AAA
- Méretek: 56 x 32 x 30 mm
- Működési hőmérséklet: 5°C ~ 40°C
- Tárolási hőmérséklet: -10°C ~ 50°C
- Működési páratartalom: 15% ~ 80%
- Tárolás páratartalom: 10% ~ 90%

HU



Maygar
Megfelelő hulladék kezelés
(használt elektromos és elektronikus eszközök)



A terméken vagy a kapcsolódó szövegekben található jelölés azt jelzi, hogy élettartama végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelés következtében a környezet és az emberi egészség károsodásának elkerülése érdekében kérjük, különítse el a terméket más hulladékfajtáktól, a felelősségteljes újrahasznosítás, az anyagi erőforrások újra felhasználásának, mint állandó gyakorlatnak az elősegítése érdekében. A háztartási felhasználók a termék környezetre nem káros újra hasznosításának érdekében vegyék fel a kapcsolatot a kiskereskedői hálózattal, ahol vették a terméket, vagy a helyi hatóságokkal, hogy információt szerezzenek, hogy hol és milyen módon semmisíthetik meg a terméket. Az üzleti felhasználóknak kapcsolatba kell lépniük beszállítójukkal, és ellenőrizniük kell a vételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad más kommunális hulladékkal együtt megsemmisíteni.